


## ●各部の名称

※水素カプセルは別売りです

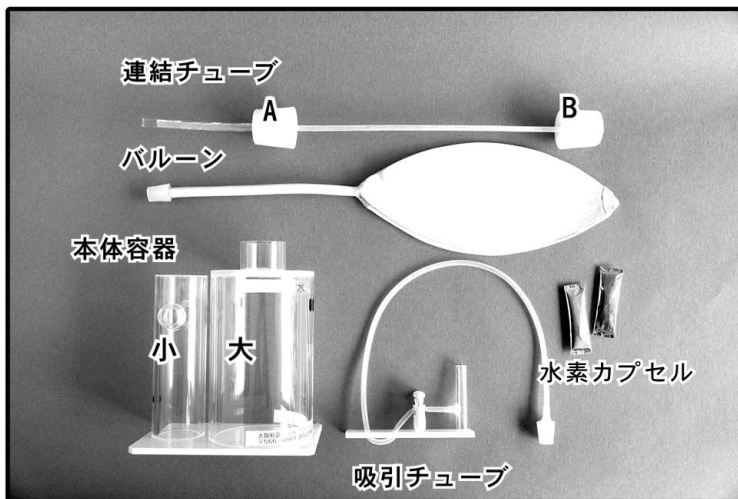


## ●使用手順

ご用意いただくもの  
 ・クエン酸（匂い、水垢防止）  
 ・ハサミ  
 ・水（水道水で可）

①水道水にクエン酸を入れて、よくかき混ぜる。  
 （500mlにつき小さじ2杯程度）

②本体容器の大小それぞれの目印部分まで①のクエン酸水を入れる。

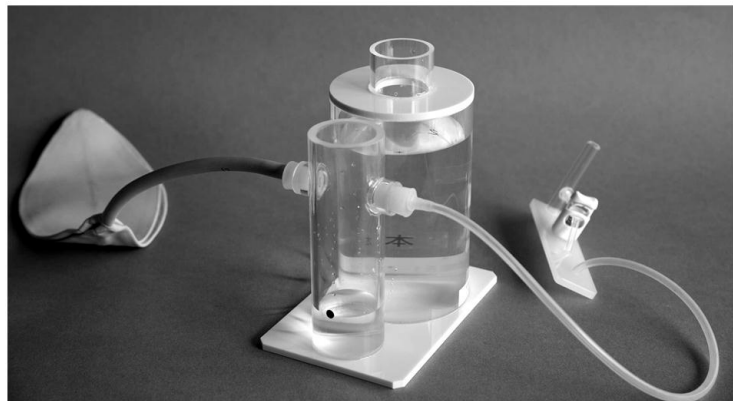

③本体容器小の取り付け穴に、バルーンと吸引チューブのパッキンを差し込む。（左右どちらでも可）  
 ※パッキンは強く押し込んで、しっかり装着してください



④本体容器小に連結チューブのAを差し込む。



⑤水素カプセルの上下にハサミで切り込みを入れ、本体容器大に入れる。  
 すぐに水素が発生しはじめるので、本体容器大の取り付け部に、連結チューブのBを素早く差し込む。




⑥2~3分程でバルーンが膨らみ切ったら（指で押して弾力を感じる程度）吸引チューブの吸い込み口を咥え、ストッパーを押し込みながら、水素を吸い込む。



☆吸引のポイント

- ・吸う前に息を吐き切る。
- ・バルーンがしぼみきるまで一気に吸いきる。
- ・吸いきったら20秒ほど息を止める。

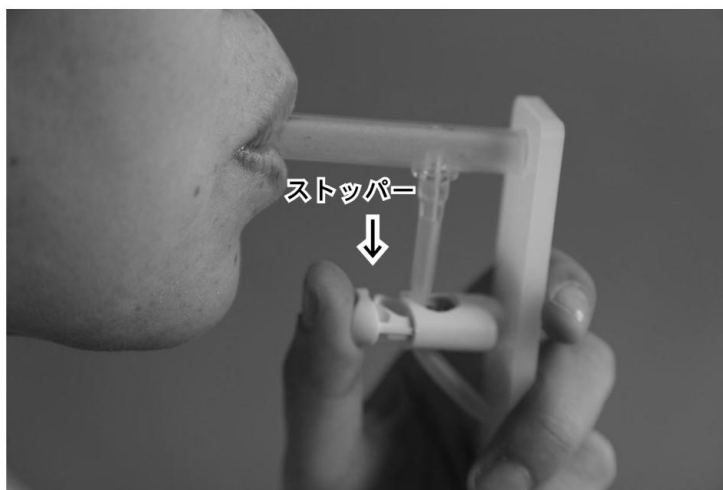

⑦使用後、水素カプセルは箸などで取り出し、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

（外側：アルミニウム、内容成分：水素化カルシウム（CaH<sub>2</sub>・綿）

本体容器の水を捨て、水洗いした後よく乾かして保管。

## ●お手入れ

・本体容器の白い水垢が気になる場合は、クエン酸水でひと晩つけ置きしていただいた後、水でよくすすいでください。

## ●こんな時は…

### ■バルーンが膨らまない

・各部のパッキンがしっかり装着されていますか？

※パッキン部分は強く押し込み、しっかり装着されていることを確認してください。

・チューブが折れ曲がったり、ねじれたりしていませんか？

・チューブが詰まっていますか？  
 ※チューブが詰まった場合は部品交換になります。

### ■水素が発生しない

・水素カプセルに切れ込みが十分に入っていますか？

・本体容器の大と小の目印部分まで水が入っていますか？



- ・火気厳禁
- ・本体に強い衝撃を与えると破損する場合があります



<https://tokihado.com/>

株式会社 都喜



〒5830011 大阪府藤井寺市沢田2丁目13-32

TEL 090-3629-6969

E-mail: tokihado@gmail.com